

CODE PRODUIT : CST1024

NOM DU PRODUIT : Bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace™ CST



Description Le bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace CST est destiné à être utilisé avec le système motorisé CleanSpace Ultra (CST1012).

Une fois le filtre retiré de l'appareil, cet accessoire est utilisé pour rendre étanche toutes les ouvertures (les deux soufflets et l'entrée d'air du filtre) du système motorisé CleanSpace Ultra. Le bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace CST doit être utilisé pendant les procédures de nettoyage. Son utilisation est également recommandée lors de la décontamination et du stockage.

Caractéristiques

- Se clipse facilement sur le système motorisé
- Facilite un nettoyage approfondi de l'appareil
- Empêche la poussière et l'humidité de pénétrer dans l'appareil lors du nettoyage, de la décontamination et du stockage

Caractéristiques techniques Poids du produit : 61 g
Dimensions du produit : 160 mm x 55 mm x 65 mm

Matériaux Nylon, Silicone

Nettoyage, conditions d'utilisation et de stockage

- Nettoyage : eau tiède et détergent doux (pH neutre 6 - 8). Ne pas utiliser de solvants (essence de térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de Javel ou d'agents chimiques
- Stockage et utilisation : entre 10°C et +30°C (50°F à +86°F) pour un taux d'humidité relative inférieur à 75%
- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile

Applications Le bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace CST est conçu pour une utilisation pendant et après les procédures de nettoyage et de décontamination, et pour le stockage.

Le bouchon de nettoyage et de stockage CleanSpace CST doit être inséré dans les deux soufflets et dans l'entrée d'air du filtre du système motorisé CleanSpace CST Ultra (CST1012).

Restrictions Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

Formation Contactez sales@cleanspacetechnology.com ou visitez [le site Internet CleanSpace - Formation](#)

Garantie Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](#) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

