

CÓDIGO DE PRODUCTO: CS3003 (S), CS3004 (M), CS3005 (L)

NOMBRE DEL PRODUCTO: Media mascarilla HALO de CleanSpace™ (S, M, L)

Compatible con la unidad de alimentación Halo de CleanSpace



Descripción Las medias mascarillas CleanSpace están diseñadas específicamente para completar el sistema HALO de CleanSpace. Compatible con los respiradores HALO de CleanSpace, las medias mascarillas se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación. Las Medias mascarillas están hechas de silicona suave que se amolda fácilmente al rostro y no causa dermatitis alérgica. **IMPORTANTE:** Si necesita un equipo intrínsecamente seguro, consulte las aprobaciones de seguridad intrínseca de su sitio. Estas Medias mascarillas NO están certificadas como intrínsecamente seguras.

Aprobaciones Compatible con *TODAS* las unidades de alimentación PAPR de CleanSpace

Estándares AS/NZS1716: 2012 EN 12942 Clasificación IP 66	Clasificación PAPR-P3
--	---------------------------------

Características

- Utilizado con el revolucionario HALO de CleanSpace: peso ligero, sin mangueras ni correas
- Las medias mascarillas están disponibles en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
- Materiales: Cojín de silicona suave, clips de nailon y policarbonato (válvula de exhalación)
- El adaptador de prueba de ajuste de mascarilla está disponible para una prueba de ajuste TSI Portacount™
- Fácil remoción. Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección.
- Transparente y facilita la comunicación

Especificaciones y materiales

- Peso: promedio 125 g
- Dimensiones: 170 mm x 130 mm x 70 mm
- Limpieza: Se puede lavar en lavarropas o con agua tibia y jabón. No utilice disolventes (trementina o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos.
- Almacenamiento y uso: -10 °C a + 55 °C (-4 °F a + 131 °F) a <90 % de humedad relativa. Almacenar lejos de la luz solar directa, grasa y aceite.

Aplicaciones adecuadas Instalaciones de atención primaria de salud, producción farmacéutica, laboratorios, instalaciones de investigación animal y personal de respuesta a emergencias / desastres. Adecuado para la protección contra partículas, incluidos los peligros biológicos transmitidos por el aire.

Capacitación Está disponible la capacitación en línea con verificación para fines de cumplimiento. Contacto sales@cleanspacetechnology.com

Limitaciones Los respiradores CleanSpace son mascarillas de presión positiva asistidas por ventiladores que filtran el aire y están diseñadas para usarse en entornos donde hay suficiente oxígeno para respirar de manera segura. No utilice CleanSpace en atmósferas IDLH (Peligro inmediato para la vida o la salud), para proteger contra gases / vapores que no se pueden filtrar, o en atmósferas enriquecidas con o deficientes de oxígeno.