

CODICE PRODOTTO: CST1024

NOME PRODOTTO: CleanSpace™ CST Tappo per la pulizia e conservazione



Descrizione	<p>Il tappo di pulizia e stoccaggio CleanSpace CST è progettato per essere utilizzato solo con il motore CleanSpace CST ULTRA (CST1012).</p> <p>Con il filtro rimosso dal dispositivo CleanSpace CST ULTRA, questo accessorio viene utilizzato per sigillare tutte le aperture (sia il soffietto che l'ingresso dell'aria del filtro).</p> <p>Durante la pulizia, tutte le aperture devono essere sigillate. Si raccomanda inoltre di sigillare tutte le aperture dopo la pulizia e la decontaminazione e durante lo stoccaggio.</p>
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Si aggancia facilmente in posizione• Facilita un alto livello di pulizia• Impedisce l'ingresso di polvere e umidità durante e dopo la pulizia, la decontaminazione e lo stoccaggio.
Specifiche	<p>Peso del prodotto: 61 g</p> <p>Dimensioni del prodotto: 160 mm x 55 mm x 65 mm</p>
Materiali	<p>Nylon, Silicone</p>
Condizioni di uso & conservazione	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia: Acqua tiepida e detergente delicato (pH neutro 6-8). Non utilizzare solventi (trementina o acetone), acqua calda, sbiancanti o agenti chimici.• Conservazione e uso: Da +10°C a +30°C (da +50°F a +86°F) con un'umidità relativa inferiore al 75%.• Conservare al riparo dalla luce solare diretta, dal grasso e dall'olio.
Applicazioni	<p>Il tappo per pulizia e stoccaggio CleanSpace CST è adatto all'uso durante e dopo i processi di pulizia, decontaminazione e stoccaggio.</p> <p>La spina per la pulizia e la conservazione di CleanSpace CST deve essere inserita in entrambi i soffietti e nell'ingresso dell'aria del filtro dell'unità di alimentazione CleanSpace CST ULTRA.</p>
Restrizioni	<p>I respiratori CleanSpace sono sistemi di filtraggio dell'aria, assistiti da ventilatore, a pressione positiva e progettati per essere indossati in ambienti in cui l'ossigeno è sufficiente per respirare in sicurezza. Non utilizzare i respiratori CleanSpace in atmosfere immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH), per proteggersi da gas/vapori che non possono essere filtrati o in atmosfere arricchite o carenti di ossigeno.</p>
Formazione	<p>Contatto sales@cleanspacetechnology.com o consultare il sito CleanSpace website per dettagli</p>
Garanzia	<p>Visitare il sito https://cleanspacetechnology.com/warranty/ per leggere importanti informazioni sulla garanzia e compilare il modulo di registrazione della garanzia online per i prodotti CleanSpace. Le parti consumabili sono garantite fino al momento dell'utilizzo, a condizione che siano state conservate correttamente e che rientrino nella data di scadenza.</p>

