



CleanSpace[®] HALO Tápon de limpieza almacenamiento



CODIGO DEL PRODUCTO	CS3011
NOMBRE DEL PRODUCTO	CleanSpace Tapón de limpieza y almacenamiento
DESCRIPCIÓN	<p>El tapón de limpieza y almacenamiento CleanSpace HALO está diseñado para utilizarse con la unidad de alimentación CleanSpace HALO (CS3001) y la unidad de alimentación CleanSpace HALO WORK (CS3001WORK)</p> <p>Este accesorio se utiliza para sellar tanto el fuelle como la entrada de aire del filtro. Por favor, retire el filtro de la unidad de potencia CleanSpace antes de su uso.</p> <p>Durante la limpieza, deben sellarse todas las aberturas. También se recomienda sellar todas las aberturas después de la limpieza y descontaminación, y durante el almacenamiento.</p>
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none">• Se engancha fácilmente• Facilita un alto nivel de limpieza• Impide la entrada de polvo y humedad durante y después de la limpieza, descontaminación y almacenamiento
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Peso del producto: 85 g• Dimensiones del producto: 170 mm x 50 mm x 40 mm (aproximadamente)
MATERIALES	Policarbonato Silicona
CONDICIONES DE LIMPIEZA, USO Y ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none">• Limpieza: Agua tibia y detergente suave (pH neutro 6 - 8). No utilizar disolventes (aguarrás o acetona), agua caliente, lejía ni agentes químicos.• Condiciones de almacenamiento: +10°C a +30°C (+50°F hasta +86°F) a una humedad relativa <75%• Almacenar alejado de la luz solar directa, grasa y aceite
APLICACIONES	<p>El tapón de limpieza y almacenamiento cleanSpace HALO es adecuado para su uso durante y después de los procesos de limpieza, descontaminación y almacenamiento.</p> <p>El tapón de limpieza y almacenamiento CleanSpace HALO está diseñado para insertarse tanto en los fuelles como en la entrada de aire del filtro de la unidad de alimentación CleanSpace HALO.</p>
RESTRICCIONES	El tapón no es un filtro. No intente utilizar el respirador con el tapón puesto.

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

No se controla si se descargo o imprime de Internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM





FORMACIÓN

Contacte sales@cleanspacetechnology.com o visite [la página web CleanSpace](#)

GARANTÍA

Visite [la sección de soporte de la página web CleanSpace](#) para leer información importante sobre la garantía y si necesario rellenar el formulario de servicio en línea. Los consumibles están garantizados antes de usarse por primera vez, si se guardan correctamente y están en el plazo de garantía. CleanSpace recomienda cambiar los filtros con regularidad.

Australia (Sede central): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

No se controla si se descargó o imprimió de Internet.

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

