



RENGÖRING

- Rengöring av ditt CleanSpace andningsskydd rekommenderas efter varje användning.
- Ta isär andningsskyddet och rengör varje komponent separat - Fläktmotorenhet, mask, huvudband, och nackstöd.
- Varje komponent hos andningsskyddet (förutom filtret) kan torkas rent.
- Utsidan av filterhöljet¹ kan torkas rent när det är monterat i Fläktmotorenheten. CleanSpace filtermedia får INTE rengöras.
- Efter rengöring, låt komponenterna lufttorka eller torka av med en luddfri trasa innan de sätts ihop igen.

För detaljerad rengöringsinformation hänvisar vi till avsnittet RESOURCES på CleanSpace hemsida: www.cleanspacetechnology.com

- För detaljerad rengörings- och underhållsinformation hänvisar vi till [Bruksanvisning](#).
- För att kontrollera att rengöringsmedlet / savetten är kompatibelt, se [Compatible Cleaning & Disinfecting Agent Supplement](#).
- För att kontrollera att komponenternas tvättprocesser är kompatibla, se dokumentet [Compatible Washing & Disinfecting Supplement](#).

Rengör INTE filtermedia eftersom det kan skada filtret.

Använd INTE tryckluft eller en borste för att rengöra eller torka någon andningsskydds-komponent.

ANVÄND INTE högtemperaturenheter som hårtorkar eller värmeelement.



- * Vissa komponenter kanske inte är lämpliga för att rengöras i en diskmaskin. Vänligen se [Compatible Washing & Disinfecting Supplement](#) för specifik vägledning.

VIKTIG INFORMATION OM RENGÖRING AV HALVMASK & HELMASK

- För rengöring av en CleanSpace halvmask, ta bort utandningsventil-locket (se Bruksanvisning).
- För att rengöra en CleanSpace helmask, ta bort den inre masken (tryck in de svarta knapparna på innermasken med tumme och pekfinger, och lyft ut den inre masken). Lyft upp regnskyddet för att förbättra åtkomsten till utandningsmembranet.
- Rengör masken och ventilen, inklusive locket (halvmask).
- Om du använder en torkduk eller handtvättar masken, lyft försiktigt och rengör runt och under utandningsventilen av silikon.
- Om du rengör masken med vatten, använd ett mildt rengöringsmedel i varmt vatten (mindre än 50°C/122°F). Skölj noga efter rengöring för att säkerställa att eventuella rester från det milda rengöringsmedlet har tagits bort.
- Låt masken lufttorka i en ren miljö eller torka för hand med en ren, luddfri trasa.
- Torka inte masken genom att utsätta den för direkt värme.
- Efter torkning, inspektera masken, se till att utandningsventilen i silikon ligger plant och att ventil-locket är på plats (halvmask).
- Kontrollera att helmaskens svarta inandningsventiler (x3) i innermasken är på plats.

VIKTIGT: CleanSpace Helmask visirmaterial är polykarbonat. Undvik att använda lösningsmedel eftersom dessa kemikalier kan göra att visiret grumlas eller blir skört och spricker. Kontakta CleanSpace för ytterligare råd om kompatibla rengöringsmedel.

VIKTIG INFORMATION OM RENGÖRING AV FLÄKTMOTORENHET

- Filtret kan lämnas på plats när du torkar ren Fläktmotorenheten.
- Med filtret borttaget från Fläktmotorenheten kan tillbehöret "Rengörings- och förvaringsplugg"² användas för att tätta alla öppningar (både bälgöppningar och filterluftintag).
- Med rengöringspluggen monterad i rätt läge på Fläktmotorenheten så kan Fläktmotorenheten³ sköljas av under rinnande vatten för rengöring.

¹ Endast modellerna CleanSpace CST, WORK och HALO.

² CleanSpace RENGÖRINGS- & FÖRVARINGS- Plugg[®] är certifierad för användning endast med CleanSpace CST ULTRA, CS EX, CS WORK och CS HALO.

³ Sänk INTE Fläktmotorenheten i vatten. Placera INTE Fläktmotorenheten i en diskmaskin. Det är en elektronisk apparat.

