



CLEANSPACE HALO SCHRITTE ZUM ABLEGEN



1. Ziehen Sie die Kopfhalterung nach vorn.

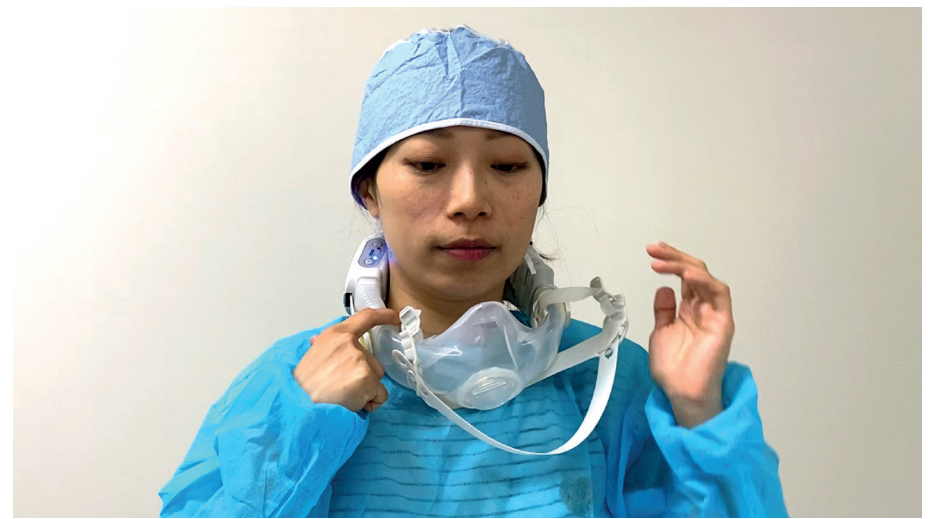

2. Ziehen Sie die Maske vom Gesicht, ohne dabei das Gerät auszuschalten. Minimieren Sie den Kontakt mit der Maske.

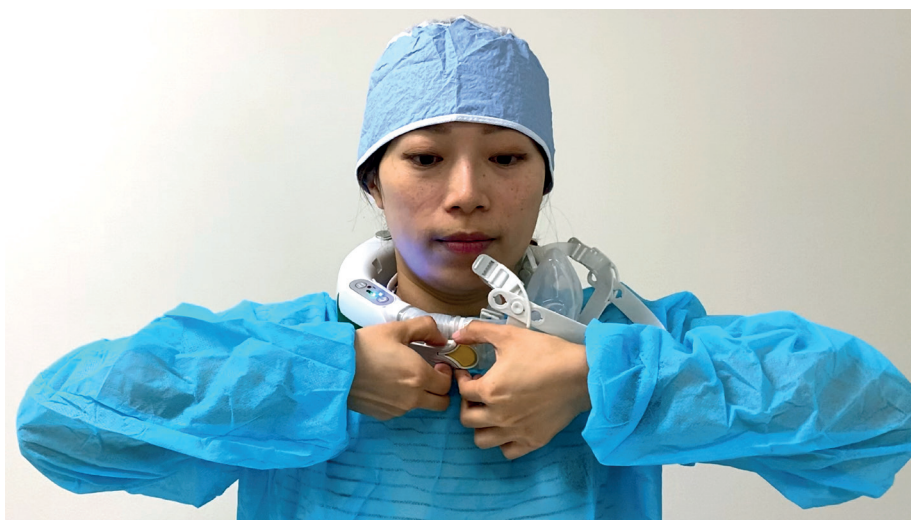

3. Drehen Sie es nach vorn, drücken Sie auf den Maskenverschluss, und lösen Sie die Maske vom Gerät, um es zu öffnen.



4. Heben Sie das Gerät an und legen Sie es ab, während Sie den Kontakt mit der Maske minimisieren.