

# GUIDE POUR METTRE LE **CLEANSPACE™** EN PLACE

**CleanSpace™**  
wearable protective masks

## 1. AVANT DE METTRE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces - le système motorisé équipé du harnais et du support nuque, le masque et le filtre.
- Vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés.




- Vérifiez que le système motorisé est chargé (trois voyants verts) et que le filtre est en place.




**IMPORTANT:** METTEZ L'APPAREIL RESPIRATOIRE AVANT DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE CONTAMINÉE.

## 2. METTRE LE DEMI-MASQUE EN PLACE

- Enclenchez UN côté du masque sur le système motorisé. Laissez l'autre côté libre.
- Mettez le système motorisé en marche. NOTE : le moteur ne se mettra en route et l'air ne circulera que lorsque l'appareil respiratoire sera en place et qu'il aura détecté la respiration.

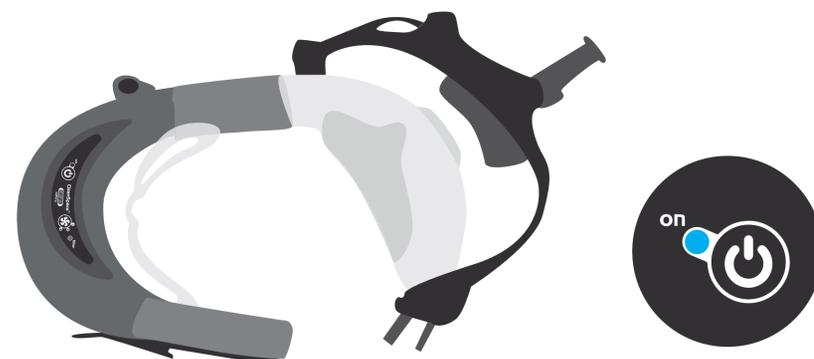

- Placez le système motorisé sur la nuque, le masque étant dirigé vers l'avant, suspendu en dessous du menton. Positionnez l'élément facial sur le visage, le menton se trouvant dans le masque et le point culminant du masque reposant de manière confortable sur l'arête du nez.
- Pour l'ajuster : le masque et le système motorisé étant en place, vous pouvez d'utiliser les boutons de réglage de chaque côté pour resserrer ou desserrer le dispositif.

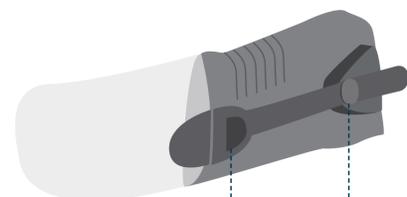


Enlever

Desserrer

## 3. METTRE LE MASQUE COMPLET EN PLACE

- Desserrez les sangles du masque complet puis mettez-le en place sur le visage et resserrez les brides pour l'ajuster.

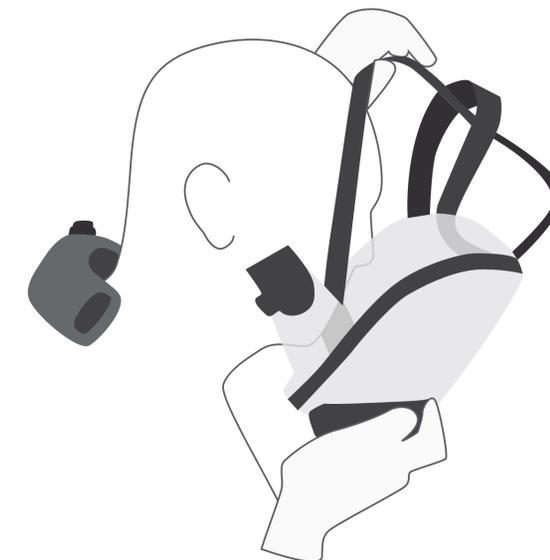

- Mettez le système motorisé en marche. NOTE: l'air ne circulera que lorsque l'appareil respiratoire sera en place et qu'il aura détecté la respiration. Placez le système motorisé sur la nuque et attachez-le au masque complet des deux côtés. Commencez à respirer. Le moteur se met alors en marche et le flux d'air démarre.



Veuillez lire les consignes d'utilisation de l'appareil respiratoire CleanSpace™ avant utilisation.

# GUIDE POUR ENLEVER LE **CLEANSPACE™**


**CleanSpace™**  
wearable protective masks

## 1. ENLEVER L'APPAREIL RESPIRATOIRE

**IMPORTANT:** QUITTEZ LA ZONE CONTAMINÉE AVANT D'ENLEVER L'APPAREIL RESPIRATOIRE.

- Desserrez les sangles d'ajustement du masque.
- Repérez le bouton rugueux qui se trouve à proximité du clip de fixation, détachez un côté du masque puis enlevez le masque et le système motorisé.

**NOTE:** le système motorisé s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes.

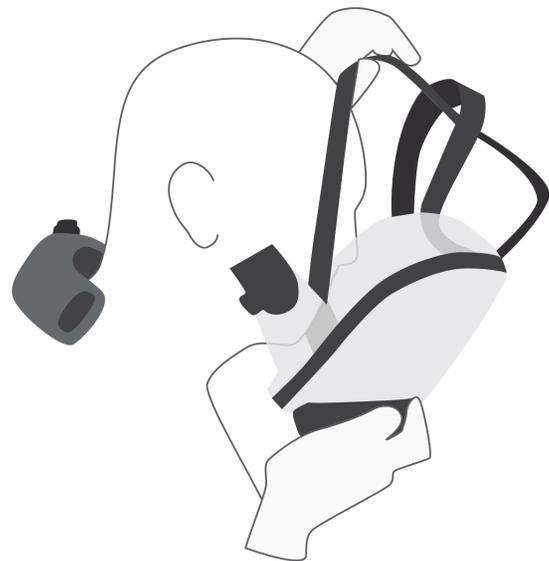

## 2. NETTOYER


- Détachez le masque du système motorisé. Nettoyez le masque à l'eau savonneuse chaude et essuyez le système motorisé.

**IMPORTANT:** NE PAS SUBMERGER LE SYSTÈME MOTORISÉ NI L'EXPOSER À UNE GRANDE QUANTITÉ D'EAU.




## 3. VÉRIFIER

- Vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées.
- Vérifiez l'alarme du filtre et remplacez le filtre si nécessaire.

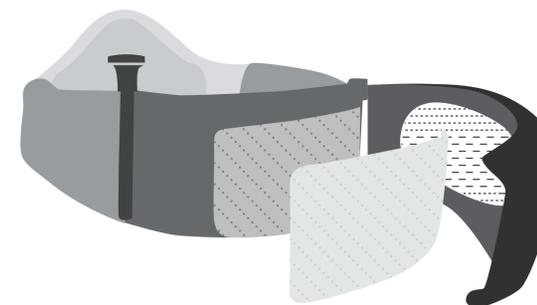

## 4. CHARGER

- Chargez le système motorisé pour qu'il soit prêt pour le prochain poste de travail.

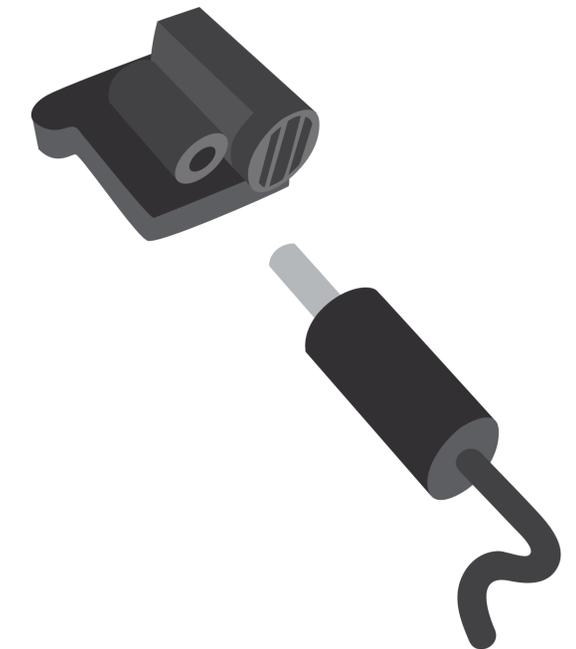

Veuillez lire les consignes d'utilisation de l'appareil respiratoire CleanSpace™ avant utilisation.