



FIT TEST AVEC DEMI-MASQUE CLEANSPACE

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'APPAREIL CLEANSPACE EST ÉTEINT ET QUE L'UTILISATEUR EST RASÉ DE PRÈS.



Lors d'un **Fit Test quantitatif**, les demi-masques CleanSpace sont équipés des accessoires suivants :

- Adaptateur Fit Test pour demi-masque CleanSpace (**PAF-0025**)
- Facultatif : 2 « grommets » CleanSpace (**PAF-1036**, pack de 6 « grommets »)

PAF-1043 : Kit pour Fit Test avec demi-masque CleanSpace comprenant : Un adaptateur Fit Test pour demi-masque CleanSpace, 6 « grommets » CleanSpace et les instructions.

Si vous utilisez les « grommets » pour Fit Test, ils doivent être insérés dans les deux bras du demi-masque. Le diaphragme circulaire noir du « grommet » devra être orienté vers le visage. Les fiches doivent être entièrement insérées dans les ouvertures ovales en plastique situées à l'extrémité des bras du demi-masque.

REMARQUE : Les « grommets » CleanSpace pour Fit Test **DOIVENT** être retirés lorsque l'appareil respiratoire CleanSpace est en cours d'utilisation (appareil en marche, mode ON / moteur fournissant un flux d'air positif dans l'appareil respiratoire).

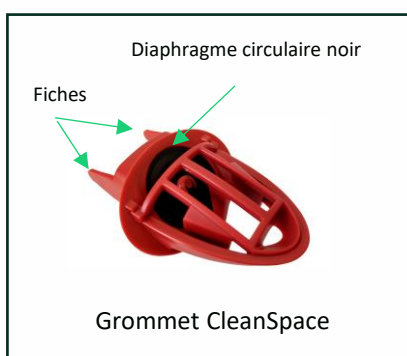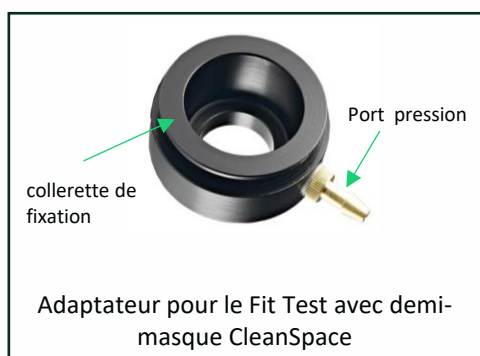

PRÉPARER LE DEMI-MASQUE CLEANSPACE POUR UN FIT TEST

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Nettoyer le demi-masque avant chaque utilisation.</p>	<p>Insérer un « grommet » dans chacun des bras du demi-masque.</p>	<p>Enlever la valve et son couvercle.</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Fixer l'adaptateur pour demi-masque à la valve d'expiration.</p>	<p>Connecter le tube transparent pour Fit Test.</p>	<p>Mettre l'adaptateur pour demi-masque en place sur le masque.</p>

Puis suivre la procédure décrite dans les manuels fournis avec l'équipement de Fit Test.

