


GUÍA DE TALLAS: MEDIAS MÁSCARAS



- El recorte de la guía de tamaño de CleanSpace está diseñado para proporcionar una guía de fácil acceso para ayudarlo a encontrar el tamaño de mascarilla adecuado para usted.
- Al alinear esta guía con la base de su mentón, podrá ver qué tamaño le sugerimos.

Para un ajuste preciso, combine la información del recorte de la guía de la máscara con esta tabla de tallas

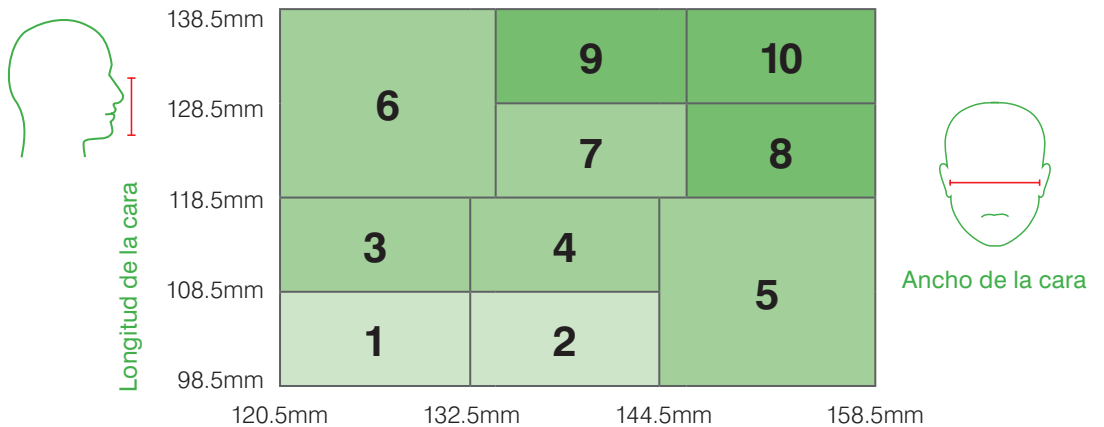

Número de ajuste	Primer intento	Entonces intenta
1-2	Pequeño	Medio
3-7	Mediano	Pequeño o largo
8-10	Grande	Mediano

- * En caras estrechas, la acción de tirar de las correas de silicón de la máscara para apretarla hace que aumente la altura de la misma. Cuanto más estrecha sea la cara, es más probable que se ajuste mejor una máscara más pequeña.
- * La cara debe estar relajada al tomar medidas.
- * Ningún instructivo puede garantizar que tenga el tamaño de máscara adecuado para su rostro. Debe confirmar el ajuste realizado de acuerdo con las regulaciones de OSHA 1910.134.

CleanSpace

GRANDE

MEDIANA

PEQUEÑA

4.

Guía de tamaño de lamascarilla CleanSpace


1. Imprime la hoja a una escala de 100%
2. Cortar a lo largo de la línea punteada
3. Alinear con la base del mentón
4. Determine el tamaño sugerido según la zona a la que se alinea la parte superior de la nariz, como se muestra al reverso.

3.

2.



1.

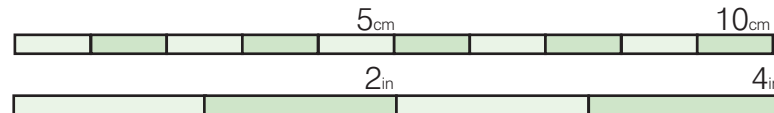

La regla impresa debe alinearse con una regla física si se imprime a una escala de 100%