

GUIDE DES TAILLES : DEMI-MASQUES



CleanSpace

Grand

Moyen


Petit

Guide des tailles de masque CleanSpace

1. Imprimez en format paysage à l'échelle 100 %
2. Coupez le long de la ligne pointillée
3. Alignez avec la base du menton
4. Déterminez la taille suggérée en fonction de la zone sur laquelle le haut de votre nez s'aligne, comme indiqué au verso

- La découpe du guide des tailles de CleanSpace est conçue pour fournir un guide facilement accessible pour vous aider à trouver le masque qui vous convient.
- En alignant ce guide avec la base de votre menton, vous pourrez voir quelle taille nous suggérons pour vous.

Pour un ajustement précis, combinez les informations de découpe qui se trouvent dans le guide du masque avec ce tableau des tailles

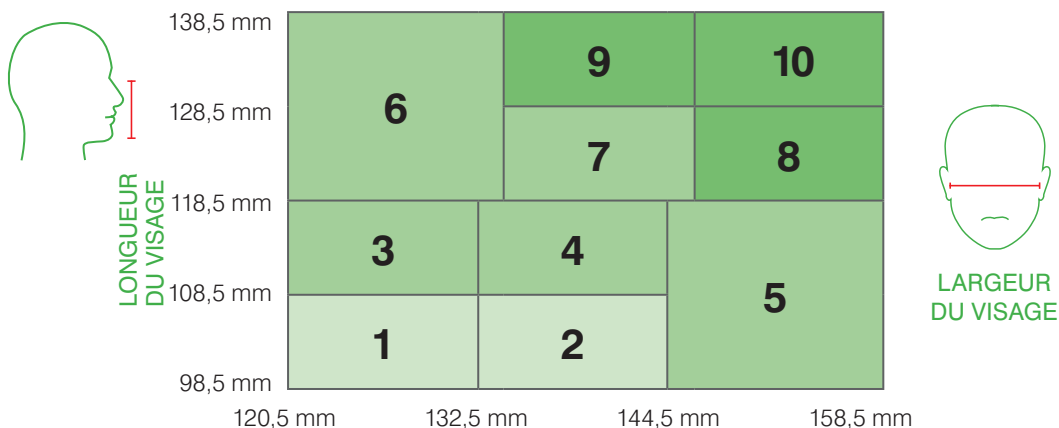

Numéro d'ajustement	Essayez d'abord	Puis essayez
1-2	Petit	Moyen
3-7	Moyen	Petit OU grand
8-10	Grand	Moyen

* Sur les visages étroits, l'action de tirer sur les bras du masque pour le serrer augmente la hauteur du masque. Plus le visage est étroit, plus il est probable qu'un masque plus petit sera mieux ajusté.

* Le visage doit être détendu lors de la prise des mesures.

* Aucun ensemble de directives ne peut garantir que le masque que vous portez est de la bonne taille pour votre visage. Vous devez confirmer l'ajustement effectué conformément à la réglementation OSHA 1910.134.

CleanSpace

Grand

Moyen

Petit

4.


Guide des tailles de masque CleanSpace

1. Imprimez en format paysage à l'échelle 100 %
2. Coupez le long de la ligne pointillée
3. Alignez avec la base du menton
4. Déterminez la taille suggérée en fonction de la zone sur laquelle le haut de votre nez s'aligne, comme indiqué au verso

3.

2.

1.

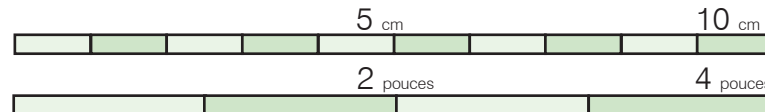

La règle imprimée doit correspondre à une règle physique si elle est imprimée à une échelle de 100 %