


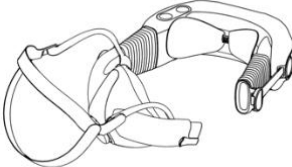

REGELMATIG GEBRUIK				
INSPECTIE	FILTER VERVANGEN	REINIGEN	OPSLAAN	TESTING & SERVICING
<p>Controleer of de componenten en accessoires in goede staat verkeren volgens de CleanSpace Gebruiksaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voordat u het apparaat gebruikt • voordat u het apparaat schoonmaakt • na het schoonmaken <p>Een volledige inspectie van de apparatuur wordt uitgevoerd als onderdeel van de aanbevolen jaarlijkse servicebeurt (Veiligheids- en Prestatiecontroles). Deze inspectie wordt uitgevoerd door een goedgekeurde CleanSpace-technicus.</p> 	<p>Raadpleeg de CleanSpace Gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde informatie over het vervangen van het filter.</p> <p>Vervang het filter in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het filteralarm wordt geactiveerd (2 akoestische piepjes per seconde en een knipperende rode LED). • Het alarm "Filter afwezig" wordt geactiveerd (continu akoestisch alarm en knipperende rode LED) terwijl er een filter geïnstalleerd is. • De luchtstroomtest mislukt (uitgevoerd met een volledig opgeladen batterij). • Het filter is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen. • Er schade aan het filter is of er wordt schade vermoed. • De vervaldatum van het filter is bereikt. De vervaldatum staat vermeld op het filterlabel of is te bekijken via CleanSpace SMART-app. • Er zijn sporen van stof of verontreinigingen op de binnenkant van het filter. • Voor gasfilters: bij het eerste teken van geur, smaak of irritatie (doorbraak) in het masker. • Het gasfilter heeft zijn maximale gebruiksduur bereikt, zoals ingesteld via de CleanSpace SMART-app. 	<p>In samenwerking met de Health & Safety Managers zullen faciliteiten een geschikte reinigingsmethode en reinigingsmiddel selecteren voor het reinigen van CleanSpace-componenten en -accessoires.</p> <p>Alle onderdelen van het CleanSpace-ademhalingsapparaat (met uitzondering van het filter) kunnen worden gereinigd, gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd.</p> <p>De CleanSpace Cleaning & Storage Plug kan tijdens het reinigen worden gebruikt.</p> <p>Belangrijk: De CleanSpace CST PRO mag niet onder stromend water worden gehouden.</p> <p>Raadpleeg de CleanSpace-gebruikersinstructies en CleanSpace-Reinigings advies Documenten voor gedetailleerde reinigingsinstructies.</p>	<p>Na het reinigen bewaar CleanSpace-componenten in een afgesloten opbergzak of een luchtdichte container tot het volgende gebruik.</p> <p>Blaasapparaten kunnen tijdens het opladen worden opgeslagen via het gebruik van het CleanSpace Docking Station.</p> <p>Als het filter wordt verwijderd voor opslag, wordt aanbevolen de CleanSpace Cleaning & Storage Plug te plaatsen om te voorkomen dat verontreinigingen het filterinlaat en de balg binnendringen.</p> <p>Als het filter tijdens de opslag op zijn plaats blijft, wordt aanbevolen om alleen de CleanSpace Cleaning & Storage Plug (balginlaatplug) te plaatsen om te voorkomen dat verontreinigingen de balg binnendringen.</p> <p>Bewaar het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, in een schone en droge omgeving.</p>	<p>LUCHTSTROOMTEST: Uitvoeren vóór elk gebruik.</p> <p>HERKALIBREREN: Herkalibratie moet worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vóór het eerste gebruik. • Als het systeem een temperatuurverandering van meer dan 20°C heeft ondergaan. • Als het systeem een hoogteverandering van meer dan 100 meter heeft ondergaan. • Als het apparaat in opslag heeft gestaan en de opslagtemperatuur onbekend is. • Als onderdeel van routineonderhoud volgens de richtlijnen van de faciliteit. • Als eerste stap bij het oplossen van problemen. <p>APPARATUURONDERHOUD: Het wordt aanbevolen om de Veiligheids- en Prestatiecontroles jaarlijks te laten uitvoeren door een goedgekeurde CleanSpace-technicus.</p>
IN OPSLAG (> 30 dagen niet gebruikt)				
INSPECTIE	FILTER VERVANGEN	REINIGEN	OPSLAAN	TESTEN & SERVICING
<p>Controleer vóór gebruik of de componenten en accessoires in goede staat verkeren volgens de CleanSpace-gebruikersinstructies.</p> <p>Een volledige inspectie van de apparatuur wordt uitgevoerd als onderdeel van de aanbevolen jaarlijkse servicebeurt. Deze wordt uitgevoerd door een goedgekeurde CleanSpace-technicus.</p>	<p>Het filter kan worden verwijderd voor opslag (zie het opslaggedeelte voor details).</p> <p>Als het filter wordt verwijderd, wordt aanbevolen de CleanSpace Cleaning & Storage Plug te plaatsen vóór opslag.</p>	<p>Reinig vóór gebruik volgens de richtlijnen van de faciliteit.</p> <p>Jaarlijkse service (Veiligheids- en Prestatiecontroles) door een goedgekeurde CleanSpace-technicus, inclusief een volledige reiniging van de apparatuur.</p>	<p>Bewaar gereinigde componenten in een afgesloten zak/container, uit de buurt van direct zonlicht, in een schone en droge omgeving.</p> <p>Laad het Blaasapparaat volledig op vóór gebruik.</p> <p>Als het filter wordt verwijderd voor opslag, wordt aanbevolen de CleanSpace Cleaning & Storage Plug te plaatsen.</p>	<p>Voer vóór gebruik een Luchtstroomtest en Herkalibratie uit.</p> <p>APPARATUURONDERHOUD: Het wordt aanbevolen om jaarlijks de Veiligheids- en Prestatiecontroles uit te laten voeren door een goedgekeurde CleanSpace-technicus.</p>
BELANGRIJK: Dit supplement moet samen met de CleanSpace gebruikersinstructies en Reinigings Supplement worden gebruikt. Ongecontroleerd als het wordt geprint of gedownload van het internet.				

