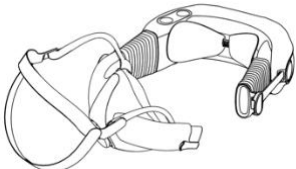


### UTILISATION HABITUELLE

INSPECTION	REPLACEMENT DU FILTRE	NETTOYAGE	STOCKAGE	RÉVISION ET MAINTENANCE
<p>Avant l'utilisation, avant et après le nettoyage, vérifiez que les composants et les accessoires de l'appareil CleanSpace sont en bon état conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Entretien annuel (contrôle de sécurité et de performance) par un technicien CleanSpace autorisé incluant une inspection complète de l'équipement.</p> 	<p>Reportez-vous au manuel d'utilisation de CleanSpace pour des instructions détaillées concernant le changement des filtres.</p> <p>Remplacez le filtre lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alarme filtre retentit (2 bips sonores par seconde et LED rouge clignote).</li> <li>• L'alarme filtre absent retentit (alarme sonore continue et LED rouge clignote) avec un filtre en place.</li> <li>• Le test de débit échoue avec une batterie complètement rechargée.</li> <li>• Le filtre a été en contact avec l'eau ou avec d'autres liquides.</li> <li>• Il y a des signes apparents ou suspectés de dommages sur le filtre.</li> <li>• Le filtre atteint sa date d'expiration. La date d'expiration est indiquée sur l'étiquette du filtre ou accessible via la CleanSpace SMART App.</li> <li>• Il y a des signes de poussière ou de contaminants sur la surface intérieure du filtre.</li> <li>• Pour les filtres à gaz/vapeurs, dès les premiers signes d'odeur, de goût ou d'irritation (claquage) dans le masque.</li> <li>• Le filtre à gaz/vapeurs a atteint sa DURÉE D'UTILISATION MAXIMALE telle que définie via CleanSpace SMART.</li> </ul>	<p>L'entreprise, en collaboration avec les responsables HSE examineront et sélectionneront la méthode et l'agent nettoyant appropriés pour nettoyer les composants et accessoires CleanSpace.</p> <p>Tous les composants de l'appareil CleanSpace (excepté le filtre) peuvent être nettoyés, désinfectés et/ou stérilisés.</p> <p>Reportez-vous au manuel d'utilisation de CleanSpace et aux suppléments de nettoyage pour des informations détaillées sur le nettoyage.</p>	<p>Stockez les composants de l'appareil CleanSpace dans un sac de stockage/boîte scellés jusqu'à la prochaine utilisation.</p> <p>Les blocs moteurs peuvent être stockés pendant la charge à l'aide de la station de rangement CleanSpace.</p> <p>Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil dans un environnement propre et sec.</p>	<p><b>TEST DE DÉBIT :</b> Avant chaque utilisation.</p> <p><b>RECALIBRAGE :</b> Un recalibrage doit être effectué :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avant la première utilisation.</li> <li>• Si l'appareil a subi un changement de température de plus de 20°C.</li> <li>• Si l'appareil a subi un changement d'altitude de plus de 100m.</li> <li>• Si l'unité a été stockée et que la température de stockage est inconnue.</li> <li>• Dans le cadre de l'entretien de routine, conformément aux directives de l'établissement.</li> <li>• Comme première étape de dépannage.</li> </ul> <p><b>MAINTENANCE DE L'ÉQUIPEMENT :</b> (Contrôle de sécurité et performance) Effectué tous les ans par un technicien CleanSpace autorisé.</p>

### STOCKÉ (au-delà 30 jours sans utilisation)

INSPECTION	REPLACEMENT DU FILTRE	NETTOYAGE	STOCKAGE	RÉVISION ET MAINTENANCE
<p>Avant utilisation, vérifiez que les composants et les accessoires sont en bon état conformément aux instructions du manuel d'utilisation.</p> <p>Entretien annuel de l'équipement (contrôle de sécurité et de performance) par un technicien CleanSpace autorisé comprenant l'inspection complète de l'appareil.</p>	<p>Le filtre peut être retiré pour le stockage de l'appareil.</p> <p>La prise de nettoyage et de stockage CleanSpace peut être utilisée (sans le filtre) pour le stockage (<i>non applicable pour le CleanSpace PRO</i>).</p> <p>Avant utilisation, insérez un nouveau filtre.</p>	<p>Avant utilisation, procédez au nettoyage conformément aux directives de l'établissement.</p> <p>Entretien annuel de l'équipement (contrôle de sécurité et de performance) par un technicien CleanSpace autorisé comprenant un nettoyage complet de l'appareil.</p>	<p>Stockez les composants de l'appareil CleanSpace dans un sac de stockage/boîte scellés, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un environnement propre et sec.</p> <p>Rechargez complètement l'appareil avant son utilisation.</p> <p>La prise de nettoyage et de stockage CleanSpace peut être utilisée (sans le filtre) pour le stockage (<i>non applicable pour le CleanSpace PRO</i>).</p>	<p>Avant utilisation effectuez un test de débit et un recalibrage.</p> <p><b>MAINTENANCE :</b> (Contrôle de sécurité et de performance) Effectué tous les ans par un technicien CleanSpace autorisé.</p>

**IMPORTANT :** Ce document doit être utilisé conjointement avec les instructions d'utilisation de l'appareil CleanSpace et les autres suppléments de nettoyage CleanSpace. Ce document n'est plus contrôlé une fois qu'il est imprimé ou téléchargé depuis le site internet.