



RESUMEN DE LOS INFORME CLEANSPACE INSIGHTS

Los informe CleanSpace Insights están disponibles para los dispositivos CleanSpace CST ULTRA que se han sincronizado mediante la aplicación CleanSpace SMART. La sincronización permite transferir los datos anonimizados al cloud CleanSpace. Luego, se genera un Informe Insights para un período de 7 o 14 días, a partir de la fecha de inicio del informe que haya seleccionado.

Se le enviará un enlace seguro de su informe por correo electrónico en un plazo de dos días laborables tras su solicitud

Antes de solicitar un Informe Insights, asegúrese de sincronizar primero los datos de las sesiones de cada uno de sus dispositivos CST ULTRA (consulte los pasos a continuación)

SINCRONIZAR LOS DATOS DE LA SESIÓN

PASO 1 – DESCARGA Y ABRE LA APLICACIÓN CLEANSPACE SMART




Disponible en la App Store (iOS) y en Google Play (Android).

Diseñada para dispositivos móviles – Apple iPhone & iPad, teléfonos & tabletas Android.

- En el App Store o Google Play, busque 'CleanSpace Smart' o escanee el código QR.
- Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en la configuración de su dispositivo móvil.
- *Solo para Android:* confirme que los Servicios de ubicación estén activados en la configuración de su dispositivo móvil

PASO 2 – EMPAREJAR EL DISPOSITIVO

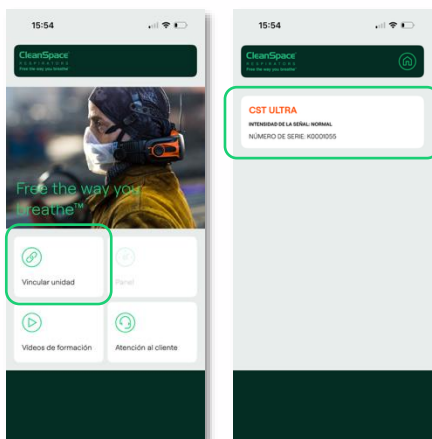

- 1. Poner el dispositivo CST en Modo de Espera**
 - Presione el botón ON una vez para poner su dispositivo CST en modo de Espera.
- 2. Abrir la aplicación CleanSpace SMART**
 - La aplicación se abrirá en la página de inicio.
- 3. Emparejar el dispositivo**
 - En la página de inicio, seleccione "Emparejar el dispositivo"
 - Se mostrarán todos los equipos CST que estén dentro del alcance Bluetooth (en Modo de Espera o Modo ON)
 - Localice y seleccione su dispositivo CST.
 - Se mostrará el número de serie del dispositivo para su identificación.
- 4. Confirmar el emparejamiento**
 - Cuando el emparejamiento se realice con éxito, el dispositivo CST emitirá dos pitidos.
 - La pantalla de inicio aparecerá automáticamente.
 - Presiona el icono "Buscar mi unidad" en la parte inferior de la página: el dispositivo emparejado emitirá **dos pitidos** para su identificación.


PASO 3 – VERIFICAR LA VERSIÓN DEL FIRMWARE

Australia (Head Office): +61 2 8436 4000 | sales@cleanspacetechnology.com

Uncontrolled if downloaded or printed from the internet.


WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM



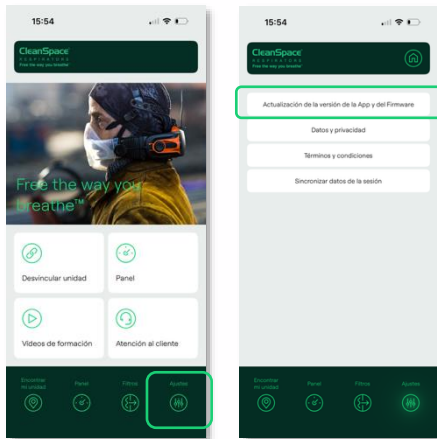


Si el firmware no está actualizado, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización o consulte [Actualización del Firmware del Respirador CST](#) para obtener orientación adicional.

1. Seleccione el icono de Configuración, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. En el menú de Configuración, elija Versión de la aplicación y Actualización de firmware

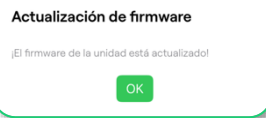

Si aparece el mensaje "¡El firmware del dispositivo está actualizado!", no se requiere ninguna acción adicional.

PASO 4 – SINCRONIZAR DATOS

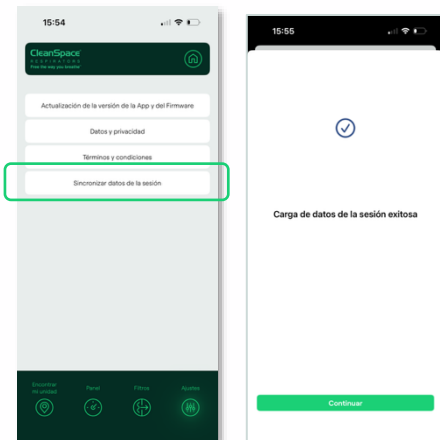

Para sincronizar los datos y generar informe CleanSpace Insights:

- Asegúrese de que el dispositivo móvil esté conectado a internet para permitir la transferencia de datos.
- Abra la página de configuración y seleccione «Sincronizar **datos de sesión**».

Se mostrará un mensaje de confirmación que indicará: «Carga **de datos de sesión exitosa**».

Si tiene alguna pregunta o desea solicitar un Informe Insights, póngase en contacto con su representante de CleanSpace o escriba a sales@cleanspacetechnology.com para obtener ayuda.

