



INSIGHTS RAPPORTER ÖVERSIKT

Insights Rapporter (eng. Insights Reports) är tillgängliga för CleanSpace CST ULTRA Fläktmotorenheter som har synkroniserats med CleanSpace SMART-Appen. Synkronisering gör det möjligt att överföra avidentifierad data till CleanSpace-molnet. En Insights Rapport genereras sedan för antingen en 7-dagars- eller 14-dagarsperiod, med början från ditt angivna rapport-startdatum. När en rapport begärs, tillhandahålls den via en säker länk till din epost inom två arbetsdagar.

Innan du begär en Insights Rapport, se till att du först synkroniserar sessionsdata för var och en av dina CST ULTRA-enheter (se stegen nedan).

SYNKRONISERA ANVÄNDARDATA

STEG 1 - LADDA NED & ÖPPNA CLEANSPEACE SMART APP




Tillgänglig från App Store (iOS) och Google Play (Android).

Utformad för mobila enheter – Apple iPhone och iPad, Android-telefoner och surfplattor.

- I App Store/Google Play söker du efter "CleanSpaceSmart" eller skanna QR-koden.
- Bekräfta att Bluetooth är PÅ i inställningarna för den mobila enheten.
- Endast Android – bekräfta att Platstjänster är PÅ i inställningarna för den mobila enheten.

STEG 2 - KOPPLA FLÄKTMOTORENHETEN MED SMART APP

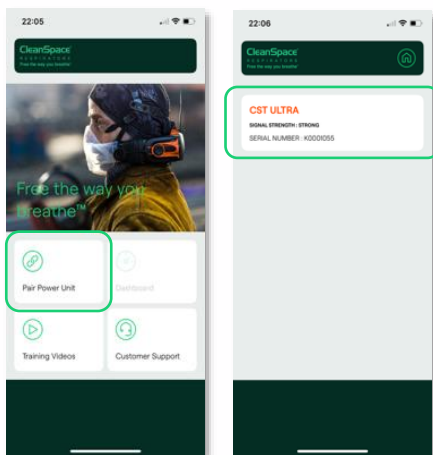

1. Ställ in CST-Fläktmotorenheten i standby-läge.

- Tryck på PÅ-knappen en gång för att ställa din CST-Fläktmotorenhet i STANDBY-läge.

2. Öppna CleanSpace SMART-Appen

- Appen öppnas på startsidan.

3. Koppla ihop Fläktmotorenheten med SMART-Appen.

- Välj "Pair Power unit" på startsidan.
- Alla CST-Fläktmotorenheter inom Bluetooth-räckvidd (i STANDBY- eller PÅ-läge) visas.
- Leta reda på och välj din CST-Fläktmotorenhet.
- Fläktmotorenhetens serienummer visas för identifiering.


4. Bekräfta Uppkoppling

- När den är ihopkopplad kommer den uppkopplade CST-Fläktmotorenheten att pipa två gånger.
- Startsidan visas automatiskt.
- Tryck på ikonen "Find My Unit" (sv. "Hitta min enhet") längst ner på sidan – den uppkopplade Fläktmotorenheten kommer att pipa två gånger för identifiering.






STEG 3 – KONTROLLERA VERSIONEN AV PROGRAMVARAN

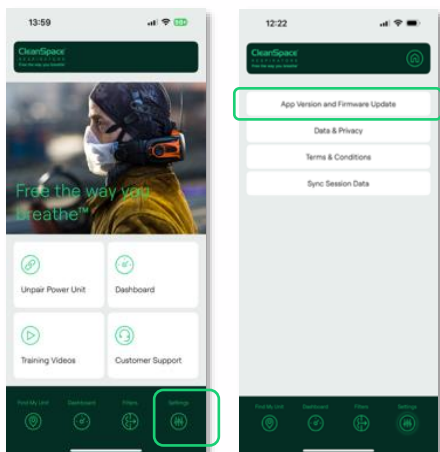


Om den inbyggda programvaran inte är uppdaterad följer du instruktionerna på skärmen för att slutföra uppdateringen, eller så läser du tillägget för uppdatering av CST andningsskyddets programvara för ytterligare vägledning.

1. Välj ikonen "Settings" (sv. Inställningar) längst ner till höger på skärmen.
2. I inställningsmenyn väljer du "App Version and Firmware Update." (sv. Appversion och programvaruuppdatering).

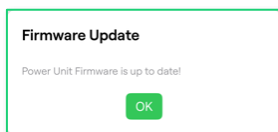

Om du ser meddelandet "Power Unit Firmware is up to date!" (Fläktmotorerhetens programvara är uppdaterad) krävs ingen ytterligare åtgärd.

STEG 4 – SYNKRONISERA DATA

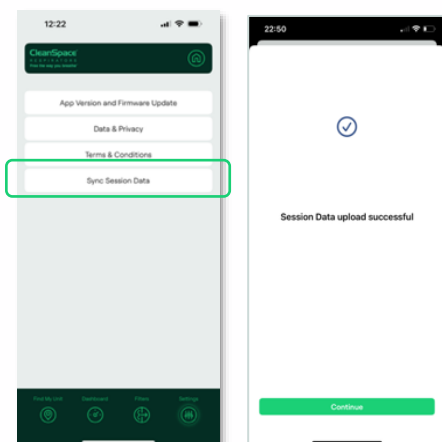

Så här synkroniserar du data för Data Insights-rapportering:

1. Se till att den mobila enheten är ansluten till internet för att tillåta dataöverföring.
2. Öppna inställningssidan "Settings" och välj "Sync Session Data" (sv. "Synkronisera sessionsdata").

Ett bekräftelsemeddelande visas som anger '**Session Data upload successful**' (sv. "Datauppladdning för Perioden lyckades").

Om du har några frågor eller vill begära en Insights Rapport, vänligen kontakta din CleanSpace-representant eller kontakta sales@cleanspacetechnology.com för hjälp.

