

1) Installez l'application CleanSpace Smart sur votre téléphone :


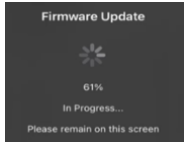

- Recherchez « CleanSpace Smart » dans le Google Play Store (Android 🇦🇷) ou dans l'Apple Store (IOS 🍏).
- Confirmez que le Bluetooth est activé dans les paramètres du téléphone.
- Accédez à l'application en sélectionnant le bouton « *START IN GUEST MODE* » (Démarrer en mode invité).

2) Jumelez votre appareil CleanSpace CST avec l'application :

- Sur l'application, sélectionnez l'option « *Pair Unit* » puis choisissez l'appareil CleanSpace que vous souhaitez jumeler.
- Assurez-vous que l'appareil respiratoire CleanSpace est en mode veille en appuyant une fois sur le bouton « *ON* ».
- Une fois jumelé, l'appareil émettra un bip et la page « *SET UP & CHECK* » apparaîtra automatiquement.
- Il faudra cocher l'option « *Inspection complete* » pour accéder au « *dashboard* » (tableau de bord).

Procédez à l'actualisation du logiciel de l'appareil CleanSpace CST :

- Une fois sur le « *dashboard* » (tableau de bord), sélectionnez en bas de l'écran « *Filter information* » (sur Android 🇦🇷) ou « *Filter change* » (Sur IOS/Apple 🍏).
- Si une mise à jour du logiciel est nécessaire, elle sera affichée sur cette page.
- Suivez alors les étapes de la mise à jour du logiciel :

	<p>Faites glisser la pastille « <i>has device been doffed?</i> » vers la droite. Puis appuyez sur « <i>Update Unit</i> ».</p>
	<p>L'actualisation du logiciel de l'appareil commence et montre la progression du processus.</p>
	<p>L'actualisation est terminée. Appuyez sur le bouton « <i>Flow test</i> » de l'appareil Le moteur se mettra en marche, laissez-le souffler pendant 5 secondes. Puis appuyez sur le bouton « <i>ON</i> » de l'appareil pour arrêter le moteur. L'actualisation de l'appareil CleanSpace CST est terminée.</p>

Please contact contactEUROPE@cleanspacetechnology.com for further information.

