

CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

Apple AppStore
からダウンロード



Google Playから
ダウンロード



CLEANSPACE SMART アプリ – 自信を持ってPPEを着用してください

CleanSpace HALOは高い保護性能と快適性を提供します。そして、CleanSpace Smartアプリを使用することにより、勤務中にいつでもマスクのフィットを確認することができます。

アカウントを作成し、施設内にあるCleanSpace HALOとペアリングすることにより、1分以内に、マスクの適合性、デバイスのパフォーマンス、バッテリーの充電を確認できます。

臨床専門家との協議のもと開発。最前線で働く医療従事者はSMARTアプリ使用時に、レスピレーターを思いのままに使用できている感覚、そしてPPEに自信を持っていると報告しています。



1. CleanSpace HALOを着用し、次のことを確認するために30秒のDaily Checkをすることが可能

- モーターとエアフローが正しく機能していること
- バッテリーが十分に充電されていること
- アラームが鳴っていないこと、または点灯していないこと

2. 1分間のFit Check

- Fit Checkは汚染ゾーンに入る前に、マスクが適切にフィットしているかどうかを示すことができます
- 良好 = すぐに使用可能
- 調節してもう一度やり直してください = サイズの確認及び調整
- 不良 = 使用せず、お問い合わせください

注：Fit Checkは、一般的なマスクフィットのみを示すことを目的としています。TSI PortaCountを使用した必須のFit Testに関しては、お住まいの国または地域の規制にしたがってください。

3. CleanSpace HALOのパフォーマンスレベルをモニタリング

- バッテリーレベル
- ファンの活動
- 温度

4. CleanSpace HALOトレーニングビデオに手軽にアクセス

- CleanSpace HALOの装着方法
- CleanSpace HALOネックサポートの取り付け・取り外し方
- CleanSpace HALOの取り外し方



CLEANSPACE SMARTアプリを今すぐ使い始めましょう
*アカウントを作成するには以下のリンクにアクセスしてください。www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup または、QRコードをスキャンしてください。

CleanSpace Smartは、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、日本語、インドネシア語でサポートされています。

アプリを最大限に活用するために、お住まいの地域で次のいずれか「CleanSpace Smart入門セッション」が行われるかを下記のEメールよりお問い合わせください。

アジア太平洋: training_ap@cleanspacetechnology.com
米国: training_us@cleanspacetechnology.com
ヨーロッパ: training_eu@cleanspacetechnology.com