


#### FONCTIONNEMENT

**IMPORTANT** : Avant utilisation, **TOUJOURS VÉRIFIER QUE L'APPAREIL RESPIRATOIRE** est complet (équipé d'un filtre), qu'il ne présente aucune détérioration et qu'il est complètement chargé. Mettre l'appareil respiratoire avant d'entrer dans la zone contaminée.

Appuyer sur le bouton « On » du système motorisé.

Note : le moteur ne se déclenchera que lorsqu'il aura détecté la respiration.

Note : Il n'y a pas de bouton « Off », l'appareil passera en mode pause au bout d'environ 5-10 secondes sans détection de respiration.

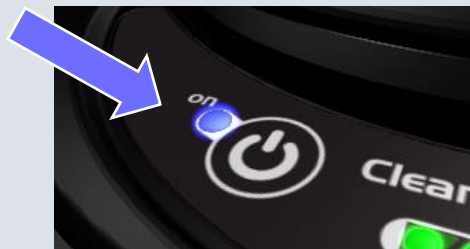

**IMPORTANT** : Toujours enlever l'appareil **APRÈS** avoir quitté la zone contaminée


#### LES ALARMES

L'appareil respiratoire CleanSpace est équipé d'alarmes pour alerter l'utilisateur en cas de batterie faible et de fin de vie du filtre (UNIQUEMENT pour les particules). VÉRIFIER l'appareil respiratoire avant utilisation :

- Si moins de 2 voyants batterie VERTS sont ÉCLAIRÉS – charger l'appareil
- Si le voyant filtre ROUGE est ÉCLAIRÉ – changer le filtre

##### 1. CHARGE BATTERIE FAIBLE


Vous entendez 3 bips répétés chaque seconde.  
Un seul voyant batterie (VERT) clignote.

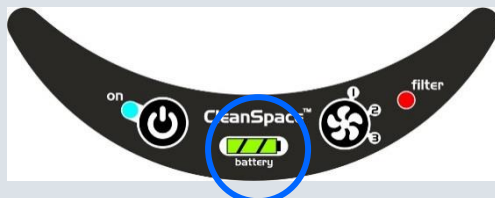

**VOTRE ACTION** : Vous disposez de 5 minutes pour quitter la zone contaminée et RECHARGER la batterie.

##### 2. FIN DE VIE FILTRE

Vous entendez 2 bips répétés chaque seconde  
et le voyant filtre (ROUGE) est éclairé.

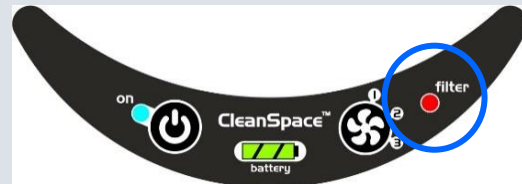

**VOTRE ACTION** : Quittez la zone contaminée et CHANGEZ le filtre

**IMPORTANT** : Lors de l'utilisation de filtres combinés pour se protéger de gaz ou vapeurs, toujours consulter votre responsable sécurité ou spécialiste protection respiratoire pour vous faire confirmer à quelle fréquence le filtre gaz doit être remplacé.

## APPAREIL RESPIRATOIRE À VENTILATION ASSISTÉE CLEANSPACE™

### Faire fonctionner l'appareil respiratoire

#### CHARGER LA BATTERIE

VÉRIFIER l'appareil respiratoire avant utilisation : s'il y a moins de deux voyants batterie VERTS éclairés, CHARGER LA BATTERIE en suivant les étapes suivantes :

1. Retourner le système motorisé et identifier le PORT CHARGEUR. Soulever l'étui de protection en caoutchouc et raccorder le câble d'alimentation à la prise.
2. Durée de charge (de déchargée à charge complète) : ~ 2 heures.
3. Une fois la batterie chargée, retirer le chargeur de batterie et replacer l'étui sur la prise de charge.




**IMPORTANT : Ne PAS mettre l'appareil respiratoire tant qu'il est connecté au chargeur de batterie.**

#### CHANGEMENT DES FILTRES

**IMPORTANT : Toujours vérifier qu'il y a un filtre en place avant utilisation.**

1. Pour remplacer le filtre standard P3 : Soulever la tige de verrouillage située à l'arrière de l'appareil.
2. Ouvrir le couvercle du filtre et retirer le filtre et le pré-filtre usés. Les remplacer par un filtre et un pré-filtre propres. Note : Se débarrasser du filtre usé de manière responsable.
3. Refermer le couvercle du filtre et remettre la tige en place pour fixer le couvercle.

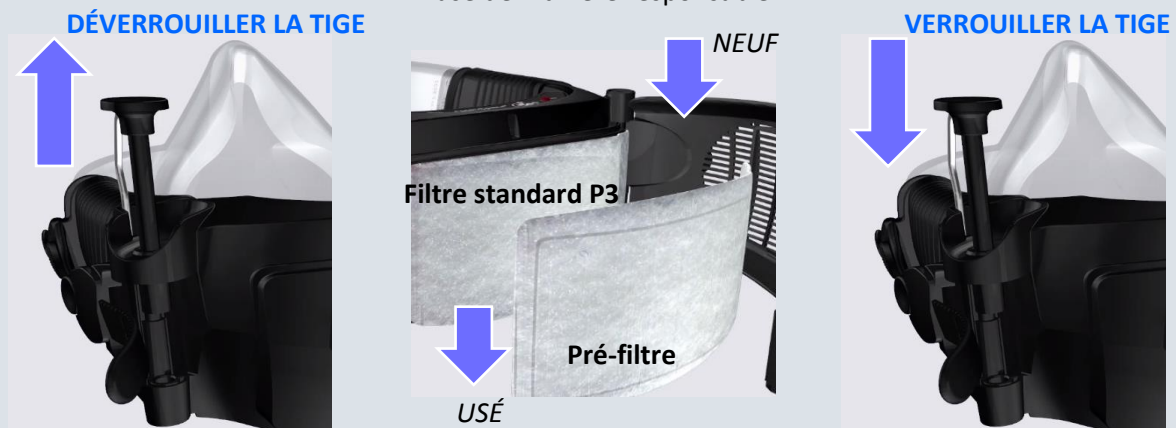

**IMPORTANT : Lors de l'utilisation de filtres combinés pour se protéger de gaz ou vapeurs, toujours consulter votre responsable sécurité ou spécialiste protection respiratoire pour vous faire confirmer à quelle fréquence le filtre gaz doit être remplacé.**

Il est recommandé aux utilisateurs de suivre le **PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE DE CLEANSPACE**. Pour accéder à la formation en ligne, envoyer un e-mail à : [sales@paftec.com](mailto:sales@paftec.com)